





Gebruiksaanwijzing voor DERMAPAK®2000


- Reinig de aangetaste nagel met een alcoholdoekje. Indien de nagel zwaar bevuild is, dient men vooraf met water en zeep te reinigen en dan pas het alcoholdoekje te gebruiken.

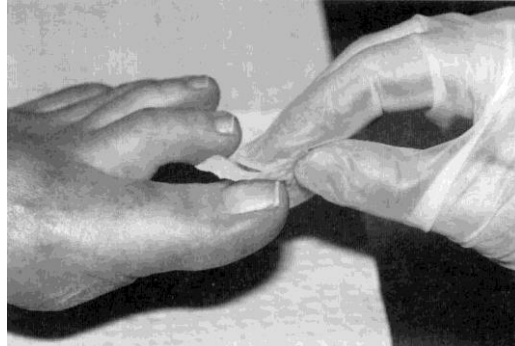

- Knip de nagel zo ver mogelijk zonder hinder voor de patiënt te veroorzaken.

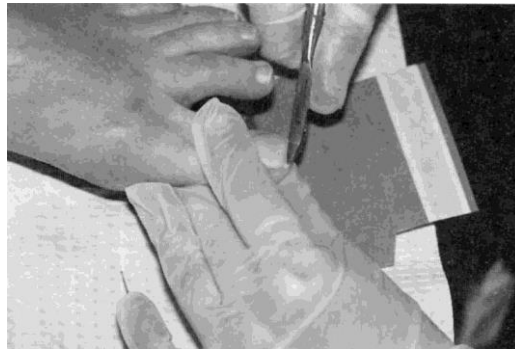

- Plaats de geopende Dermapak® 2000 onder de nagel. Flap A wordt geopend.

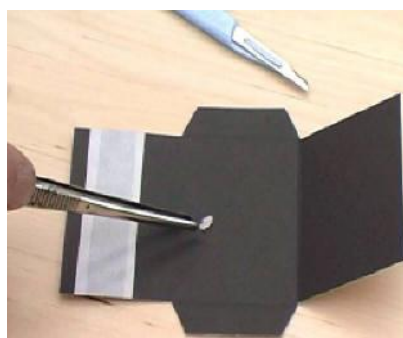


- Knip een stukje aangetaste nagel af met een schaar. Afgesneden stukjes dienen de ganse dikte van de nagel te omvatten en zo ver mogelijk van de nagel tip verwijderd afgenomen te worden.


***Identificeer éénduidig met de naam of kleef een labosticker
en schrijf de aard van het staal op het recipiënt***



Alternatief :

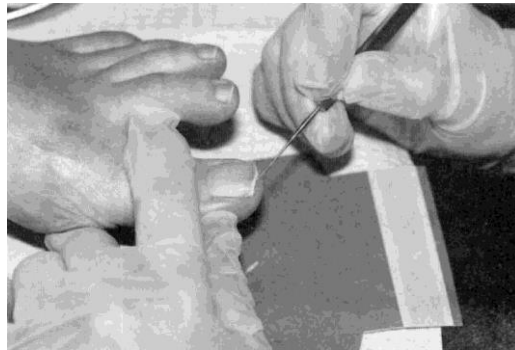

- Men kan debris van onder de nagel verwijderen door te schrapen met een curette of spatula.

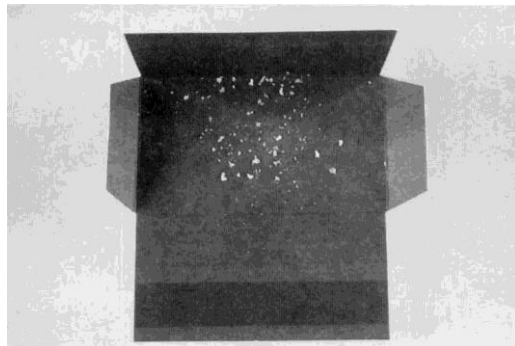

Verpak het materiaal voor verzending



- Oriënteer Dermapak® 2000 zodanig dat de kleefstrip van U verwijderd is.
- **Vouw eerst Flap A naar beneden en vervolgens de zijflappen B en C**
- Verwijder de kleefstrip, vouw daarna Flap D en druk stevig aan.
- Vul de gegevens op keerzijde zo volledig mogelijk in.
- **Gebruik geen kleefband of nietjes om af te sluiten.**
- Plaats in het bijbehorend plastieken zakje, sluit dit zorgvuldig af. Verstuur samen met een volledig ingevuld aanvraagformulier in de verzendenveloppe.

***Identificeer éénduidig met de naam of kleef een labosticker
en schrijf de aard van het staal op het recipiënt***